

Združuje preprosto uporabo naprednih obvez za rane s preverjenimi prednostmi¹ zdravljenja ran z negativnim tlakom.

KLINIČNI DOKAZI RANDOMIZIRANIH KONTROLIRANIH PRESKUŠANJ

Armstrong¹

V randomiziran kontroliran preskus je bilo vključenih 132 bolnikov z diabetičnimi in venskimi ranami na različnih mestih na spodnjih okončinah. 118 bolnikov se je zdravilo s sistemom SNAP™ (n = 59) ali V.A.C.® (n = 56), od katerih jih je 115 preskušanje tudi končalo.


- Bolnike so zdravili največ 16 tednov ali dokler se rana ni zaprla.
- V primarni analizi končnega učinka zmanjšanja velikosti rane so ugotovili, da zdravljenje bolnikov s sistemom SNAP™ ni bilo nič manj uspešno kot pri bolnikih, zdravljenih s sistemom V.A.C.®, v četrtem, osmem, dvanajstem in 16. tednu ($p = 0,0030, 0,0130, 0,0051$ in $0,0044$).
- Študija je pokazala, da učinek zdravljenja s sistemom SNAP™ ni bil bistveno drugačen od učinka zdravljenja s sistemom V.A.C.® z vidika popolnega zaprtja rane pri udeležencih v raziskavi ($p = 0,9620$).
- Bolniki, zdravljeni s sistemom SNAP™, so poročali o manj prekinitvah svoje dnevne rutine kot bolniki, zdravljeni s sistemom V.A.C.®. Pri bolečinah, ki spremljajo zdravljenje, pa ni bilo pomembnih razlik med obema skupinama udeležencev.
- Druge prednosti, na katere so opozorili avtorji, so bile krajši čas namestitve obveze in enostavnost uporabe.
- Kljub randomizaciji je bila začetna velikost rane bistveno večja pri zdravljenju bolnikov s sistemom V.A.C.® kot pri bolnikih, zdravljenih s sistemom SNAP™ (v povprečju $9,95 \text{ cm}^2$ v primerjavi s $5,37 \text{ cm}^2$; $p = 0,0093$).



-125 mmHg

Kaseta za zdravljenje SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka	Tlak	Zmogljivost
SNPA125	-125 mmHg	60 ml

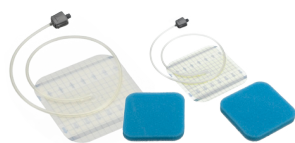

Napredni komplet z obvezo SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka	Velikost:	Vmesni sloj
SKTF10X10	10 cm x 10 cm	Pena
SKTF15X15	15 cm x 15 cm	Pena



Komplet s premostitveno obvezo SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka	Velikost:	Vmesni sloj
BKTF14X11	14 cm x 11 cm	Pena
BKTF14X11S	14 cm x 11 cm s SNAP™ SecurRing™ s hidrokoloidom	Pena



SNAP™ SecurRing™ s hidrokoloidom (10 kosov)

Oznaka izdelka	Velikost:
SRNG10	Premier 5 cm



Trak za zdravljenje SNAP™ (posamično)

Oznaka izdelka	Velikost:
STPAS	S 46 cm
STPAM	M 53 cm
STPAL	L 61 cm

Za naročanje izdelkov ali več informacij se obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Acelity.

VIRI

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. Wound Rep Reg. 2012; 20(3):332-341

OPOMBA: Za izdelke in zdravljenje družbe KCI obstajajo posebne indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostni ukrepi in varnostne informacije. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom in preberite navodila za uporabo. To gradivo je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom.

©2016 KCI Licensing, Inc. Vse pravice pridržane. Vse navedene blagovne znamke so v lasti družbe KCI Licensing, Inc., njenih podružnic in/ali dajalcev licenc. DSL#16-0639.SL (Rev. 10/16)

SISTEM ZA ZDRAVLJENJE SNAP™

ZDRAVLJENJE KRONIČNIH RAN
Z NEGATIVNIM TLAKOM NA MEHANSKI
POGON (NPWT)



ZDRAVLJENJE SMART NEGATIVE PRESSURE™

PAMETNO ZA ZDRAVNIKE – BOLNIKE – USTANOVE

Sistem za zdravljenje SNAP™ združuje preprosto uporabo naprednih obvez za rane s preverjenimi prednostmi¹ zdravljenja ran z negativnim tlakom. Sistem za zdravljenje SNAP™ je namenjen za oskrbo ran z uporabo negativnega tlaka, pri čemer pripomoček vpija majhne količine izcedka in tako spodbuja celjenje ran.



Tehnologija tihe kasete

Inovativna, prenosna oblika pripomočka zagotavlja zdravljenje ran z negativnim tlakom brez električne energije.

Bolniku prijazne lastnosti

- Majhen, lahek pripomoček, ki je diskretno skrit pod obleko
- Mehansko delovanje – brez baterij ali električnih kablov
- Tiho delovanje; brez glasnih alarmov, ki bi motili spanec

Inovativna oblika

- Lasten vzmetni mehanizem ustvarja dosledno enako raven negativnega tlaka (-125 mmHg)
- Tehnologija geliranja izcedka BIOLOCK™ zagotavlja boljše zadrževanje
- Vizualni indikator omogoča preprosto in natančno spremljanje ravni izcedka




Za poenostavitev naprednega zdravljenja ran

- Enostavna uporaba, pri kateri nameščanje traja manj kot 10 minut¹
- Omogoča hitro in preprosto zatesnitev na neravnih površinah kože in težje dostopnih delih telesa
- Komponente za enkratno, takojšnjo uporabo

Kompleti obvez in dodatna oprema SNAP™


Lastniške hidrokoloidne obveze ščitijo okolico rane in omogočajo enostavno odstranitev. Z dodatno opremo lahko še bolj poenostavite njihovo nameščanje.

Napredne hidrokoloidne obveze SNAP™

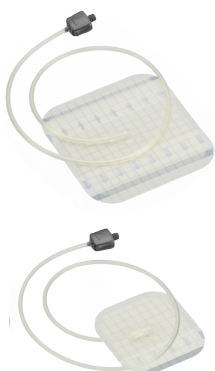


- Napredni hidrokoloid ohranja tesnjenje in pomaga zmanjšati maceracijo okolice rane
- Popolnoma integriran mikroprikluček omogoča velik kot upogibanja za uporabo pri težko dostopnih ranah
- Obvezo in cevko je mogoče obrezati do velikosti, ki ustreza posameznemu bolniku
- Nepovratni ventil zadržuje izcedek, ki se izloča iz rane

Posebna premostitvena obveza SNAP™

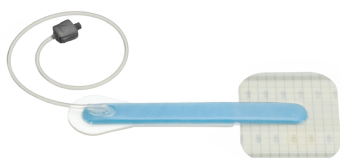

- Integriran mostiček in priključek za namestitev v enem koraku
- Mehka blazinica pod mostičkom za večje udobje bolnika in čim manjšo možnost dodatnih poškodb zaradi pritiska

Mesta uporabe:

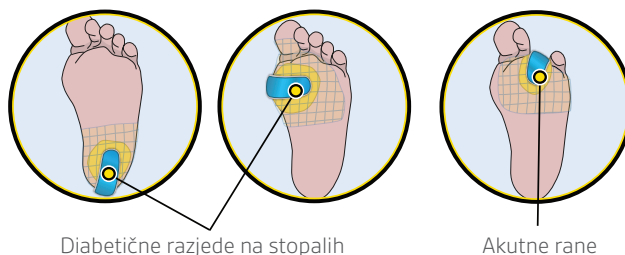

Diabetične razjede na stopalih

Akutne rane

Izboljšana kakovost življenja bolnikov¹

- Majhen, tih, diskreten in lahek pripomoček, ki ga je mogoče brez težav skriti pod oblačili
- Minimalno posega v bolnikove aktivnosti, spanje in socialne interakcije
- Ne vpliva na mobilnost bolnikov, zato so lahko ves čas zdravljenja aktivni



Penasto polnilo za rane

- Spodbuja granulacijo tkiva v ranah*
- Omogoča enakomeren negativni tlak*
- Hidrofobna sestava omogoča odstranjevanje izcedka*



Hidrokoloidni obroč SNAP™ SecurRing™

- Omogoča hitro in preprosto zatesnitev na neravnih površinah kože in težje dostopnih delih telesa
- Zmanjšuje količino dodatne opreme, potrebne za zatesnitev in zaščito rane pred vlago
- Povečuje oprijem obveze SNAP™ na suhi in neravni površini kože



Trak za zdravljenje SNAP™

- Mehek trak omogoča, da bolniki pripomoček udobno in diskretno nosijo pod obleko

*Referenčni podatki